



Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

Stati Uniti
+1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com

Africa, Russia, CIS
+44 161 483 9032
EMeproducsupport@abbott.com

Asia Pacifico
+61 7 3363 7711
AProducsupport@abbott.com

Canada
+1 800 818 8335
CANproducsupport@abbott.com

Europa e Medio Oriente
+44 161 483 9032
EMeproducsupport@abbott.com

America Latina
+57 (1) 4824033
LAproducsupport@abbott.com

Servizio di assistenza tecnica telefonica
È possibile ricevere maggiori informazioni dal proprio distributore oppure contattando l'assistenza tecnica ai seguenti recapiti:

4 Confermare il test
Confermare il tipo di test per abbinare il campione CQ previsto per il test sfiorando "OK" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'analisi.


3 Selezionare il test CQ da eseguire.

2 Selezionare "VRS" dal menu.

1 Sforare "Esegui CQ".

Il tampone esterno positivo e un tampone sterile per il controllo negativo devono essere analizzati una volta per ogni nuova spedizione ricevuta e una volta per ogni operatore non addestrato.
Per l'analisi CQ, selezionare Esegui CQ nella schermata Home e seguire le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'esecuzione di un test CQ nel Manuale d'uso dell'ID NOW Instrument.

Nota: il test CQ viene eseguito nello stesso modo di un test paziente su tampone nasale diretto. Per le istruzioni dettagliate fare riferimento all'altro lato.

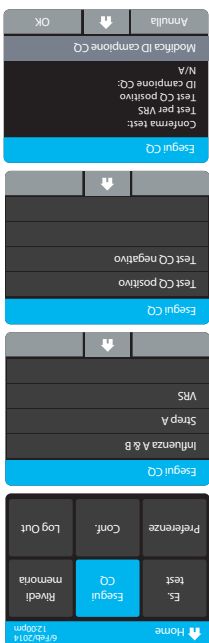

ID NOW[™]
RSV

ISTRUZIONI DI RIFERIMENTO RAPIDO

Materiali necessari per eseguire un test:



Base
test



Ricevitore
campioni



Cartuccia di
trasferimento



Tampone
nasofaringeo

Strumento:

Supporto per
la base test

Supporto
per il
ricevitore
campioni



COMPLESSITÀ CLIA: ESENTE


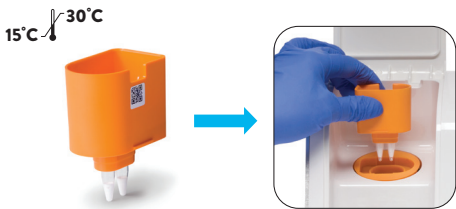

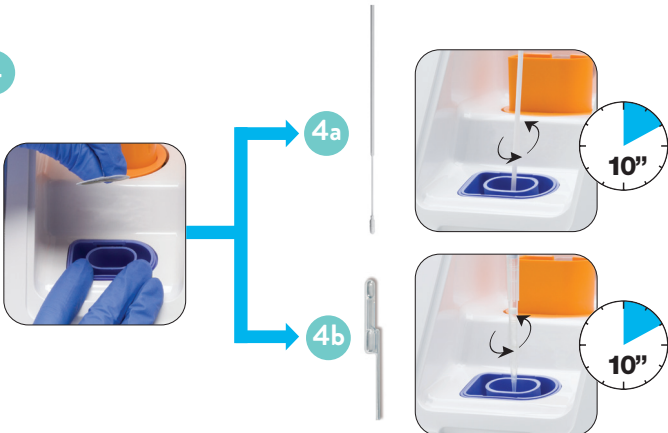
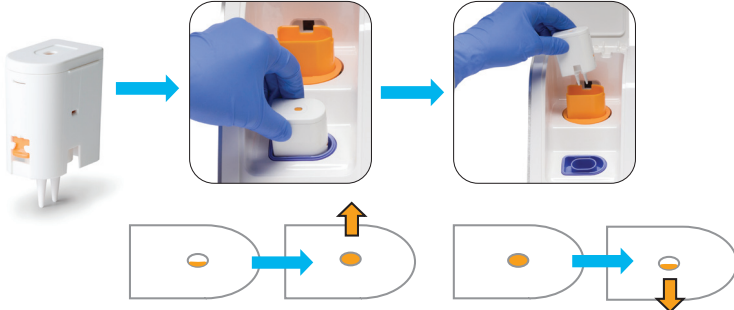

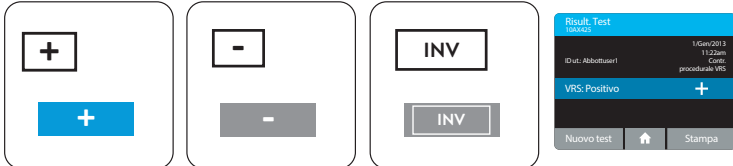
Per le istruzioni complete, fare riferimento al manuale d'uso e al foglio illustrativo del prodotto ID NOW RSV.


ID NOW™ RSV

ISTRUZIONI DI RIFERIMENTO RAPIDO



Per la procedura di analisi completa e ulteriori informazioni, prima di eseguire questo test fare riferimento al manuale d'uso e al foglio illustrativo di ID NOW RSV.

Seguire le istruzioni passo dopo passo visualizzate sullo schermo dello strumento.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

In caso di risultato del test non valido, fare riferimento alle istruzioni del foglio illustrativo per la procedura di ripetizione del test.
- 

Per le istruzioni sulla gestione e sullo smaltimento in sicurezza dei campioni e dei componenti del test, fare riferimento al foglio illustrativo.

Abbott ID NOW RSV QRI, IT Size: 8.5 in. x 11 in.	Printed Colors  CMYK	PN: IN435001it Rev: 6 Date of Last Revision: 6.1 2020/09/01
	Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing  <div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div>PMS 303 U Dark Blue</div><div>PMS 324 U Mint</div></div>	