


# Abbott ID NOW™ RSV HURTIGVEILEDNING

## Materialer som er nødvendige for å kjøre en test:



## Instrument:

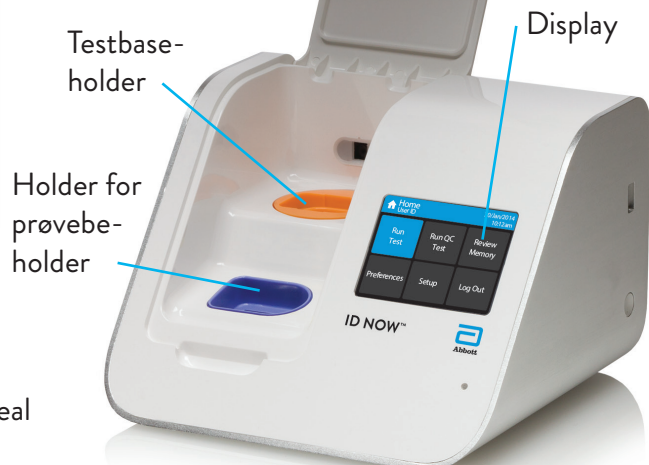

## CLIA-KOMPLEKSITET: FRITATT

Se pakningsvedlegget og brukerhåndbok for ID NOW RSV for fullstendige instruksjoner.

Eksterne positive penselprøver og en steril penselprøve for negativ kontroll bør testes en gang med hver ny leveranse og en gang for hver nye operatør som ikke har fått opplæring.

For QC-testing velger du Kjør QC-test på skjermbildet Hjem, og følger instruksjonene som vises. Se Kjøre en QC-test i ID NOW Instrument brukerhåndbok for nærmere detaljer.



1 Trykk på "Kjør QC-test".

2 Velg "RSV" fra menyen.

3 Velg QC-testen som skal kjøres.

4 Bekreft test  
Bekreft testtypen som skal passe til QC-prøven tiltenkt for testing ved å trykke på "OK" og deretter følge instruksjonene på skjermen for å fullføre testingen.

**Merk:** Kvalitetskontrolltesten kjøres på samme måte som en nasofaryngeal pasientpenselprøve. Se den andre siden for trinnvise instruksjoner.

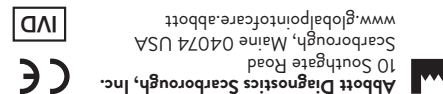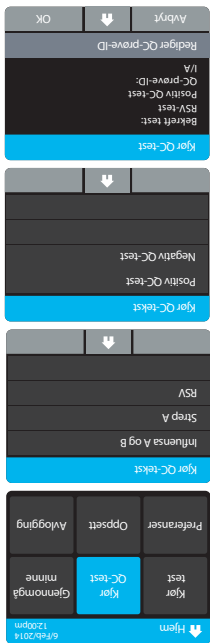


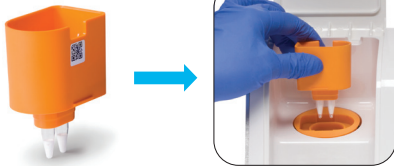
**USA**  
+1 855 731 2288  
ts.scr@abbott.com  
**Afrika, Russland og tidligere USSR-republikker og -områder**  
+44 161 483 9032  
EMESupport@abbott.com  
**Asia og Stillehavsområdet**  
+61 7 3363 7711  
APSupport@abbott.com  
**Canada**  
+1 800 818 8335  
CANSupport@abbott.com  
**Europa og Midtøsten**  
+44 161 483 9032  
EMESupport@abbott.com  
**Latin-Amerika**  
+57 (1) 4824033  
LAPSupport@abbott.com








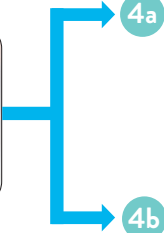

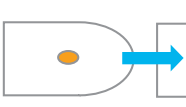
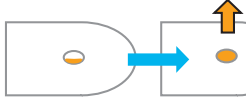

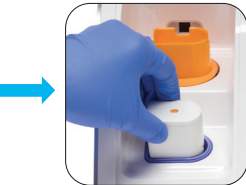








# ID NOW™ RSV HURTIGVEILEDNING




Før du utfører denne testen, må du lese pakningsvedlegget og brukerhåndbok for ID NOW RSV for å finne en fullstendig testprotokoll og ytterligere informasjon.

Følg de trinnvise instruksjonene som vises på instrumentskjermen.



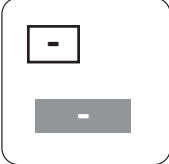

- 
- 15°C → 30°C


- 15°C → 30°C


- 
- 
- 
- 

Se instruksjonene i produktvedlegget for prosedyrer ved ny testing av et ugyldig testresultat.
- 

Se pakningsvedlegget for instruksjoner om sikker håndtering og kassering av prøver og testkomponenter.

<b>Abbott</b> ID NOW RSV  QRI, NO  <b>Size:</b> 8.5 in. x 11 in.	<b>Printed Colors</b>  CMYK	<b>PN:</b> IN435001no <b>Rev:</b> 6  <b>Date of Last Revision:</b> 6.1 2020/09/01
	<b>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</b> Colors below are not used for printing  PMS 2995 U Primary Blue  PMS 303 U Dark Blue  PMS 324 U Mint	