




Abbott

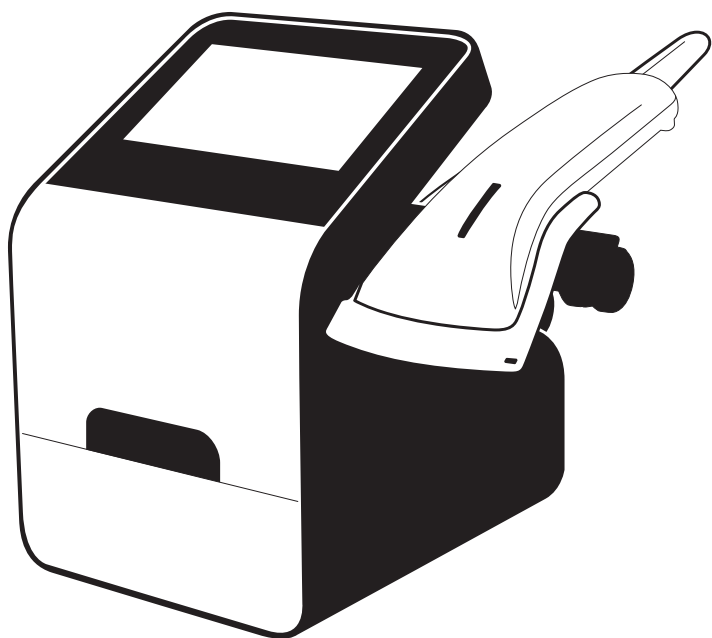

DIGIVAL™

HURTIGSTARTVEILEDNING



www.globalpointofcare.eifu.abbott

Innhold

REF LFR-000

REF LFR-024



DIGIVAL™

REF L22XWU1-200



Strekkodeleser og hylster




Strekkodeleserbrakett



Strømforsyningsmodul

REF INLFR000

REF INLFR024

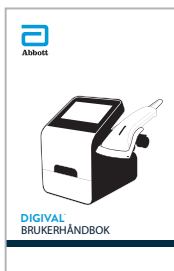

Brukerhåndbok

REF LFR-003



Kalibreringskontrollkort-pakke

Innhold

REF

LFR-004



DIGIVAL™ Tray 1-pakke

Tilleggsutstyr

REF

MCP1810395



Skriver

REF

EQ004003



Abbott USB-minnepinne

Pakk ut forsendelsespakken og se etter synlig skade.

Oppsett av avleseren DIGIVAL™


Plasser DIGIVAL på en vatret benkeplate med tilgang til en strømforsyning.



- ❶ Plasseringshull for strekkodeleserbrakett
- ❷ USB-port (x1)
- ❸ Strømkontakt
- ❹ Ethernet
- ❺ USB-porter (x2)




Montering av strekkodeleserens hylster

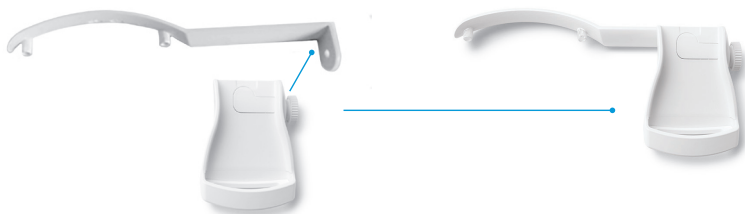


Koble brakettinnretningen til baksiden av DIGIVAL. Fest strekkodeleseren til USB-en og plasser den i hylsteret.



Koble til strømforsyningen og slå på DIGIVAL.

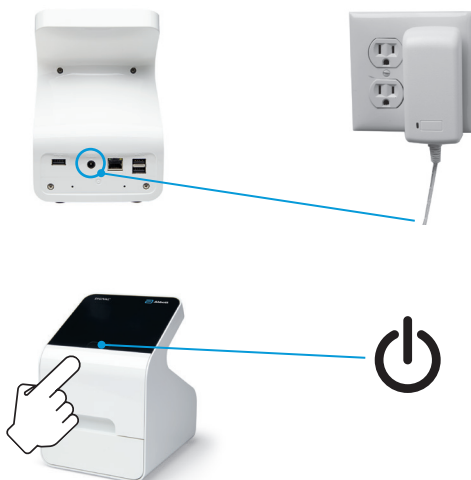

Åpne skuffen, fjern brettet og plasser kalibreringskontrollkortet i posisjonen som vist på skjermen.

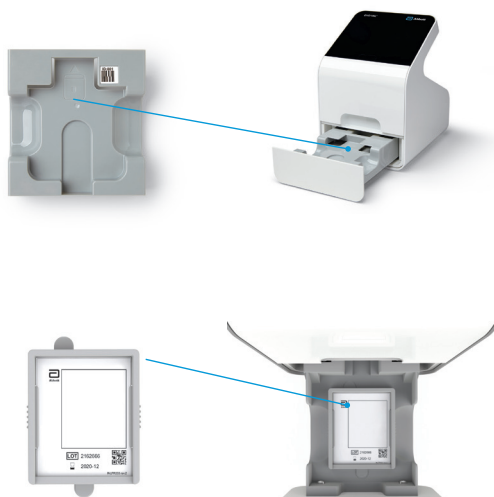

Angi admin-passordet
Angi 'admin'

Innstillinger - Admin-passord

Angi nytt admin-passord

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
⌂	z	x	c	v	b	n	m	↩	
? 123								,	.
Tilbake			⬆		Abc				


Still inn datoen

Innstillinger - Dato


Velg alternativ

	År	Måned	Dag
<input type="radio"/> DD/MM/ÅÅÅÅ	2019	1	24
<input type="radio"/> MM/DD/ÅÅÅÅ			
<input type="radio"/> ÅÅÅÅ/MM/DD			
Tilbake		⬆	OK

Still inn klokkeslettet

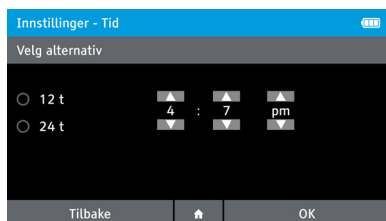

Sjekk instrumentkalibreringen

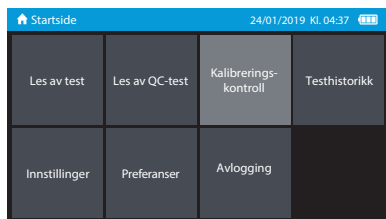

Bestillings- og kontaktinformasjon

REF LFR-000: DIGIVAL - OUS 📞 +1 321 441 7200

REF LFR-024: DIGIVAL - US 📞 +1 877 441 7440

Teknisk støtte

USA

+1 888 735 5317

ts.scr@abbott.com

Afrika, Russland og SUS

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

Asia og Stillehavsområdet

+61 7 3363 7711

AP.TechSupport@abbott.com

Canada

+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

Europa og Midtøsten

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

Latin-Amerika

+57 601 482 4033

LA.TechSupport@abbott.com



Abbott



Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.

10 Southgate Road

Scarborough, Maine 04074 USA

www.globalpointofcare.abbott



www.globalpointofcare.eifu.abbott



© 2024 Abbott. All rights reserved.

All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

INLFR009no Rev. 7 2024/03

<div>Abbott</div> <div>DIGIVAL</div> <div>QSG, NO</div> <div>Size:</div> <div>5.25 in x 8.5 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: INLFR009no</div> <div>Rev: 7</div> <div>Date of Last Revision:</div> <div>7.3 2024/03/18</div>
	<div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div>PMS 303 U Dark Blue</div></div></div>	