




**Abbott**

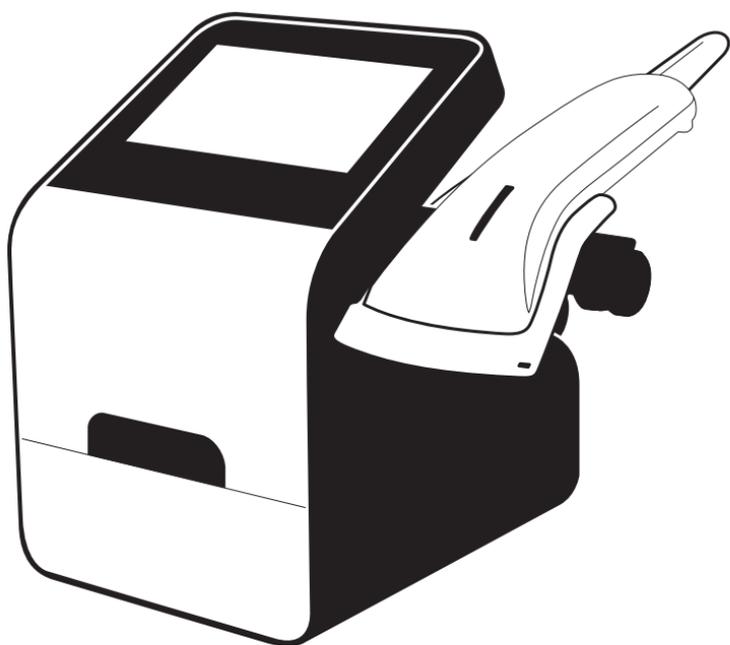

# DIGIVAL™

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



[www.globalpointofcare.eifu.abbott](http://www.globalpointofcare.eifu.abbott)

## Содержание

**REF** LFR-000

**REF** LFR-024



Считывающее устройство  
DIGIVAL™

**REF** L22XWU1-200



Сканер штрихкода и подставка



Держатель сканера штрихкода



Блок питания

**REF** INLFR000

**REF** INLFR024



Руководство пользователя

**REF** LFR-003



Блок карт для проверки  
калибровки

## Содержание

**REF** LFR-004



DIGIVAL™ Tray 1 в упаковке

## Дополнительные принадлежности

**REF** MCP1810395



Принтер

**REF** EQ004003



Флеш-карта Abbott USB

*Распакуйте транспортировочный контейнер и проверьте устройство на наличие видимых повреждений.*

## Установка DIGIVAL™

Разместите считывающее устройство DIGIVAL на ровной поверхности стола с доступом к источнику питания.



- 1 Фиксирующие отверстия держателя сканера штрихкода
- 2 USB-порт (1 шт.)
- 3 Разъем питания
- 4 Разъем для подключения к сети Ethernet
- 5 USB-порты (2 шт.)




## Сборка подставки сканера штрихкода



Подсоедините держатель в сборе к считывающему устройству DIGIVAL сзади.  
Подключите сканер штрихкода к USB-порту и поместите на подставку.



Подключение источника питания и включение считывающего устройства DIGIVAL

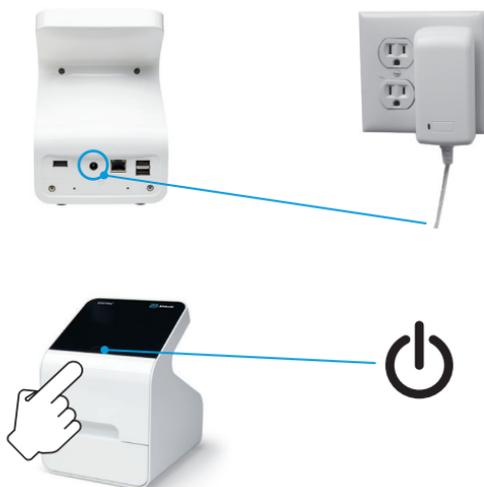


Откройте выдвижную панель, извлеките лоток и поместите карту для проверки калибровки в положение, указанное на изображении.




## Ввод пароля администратора


Введите «admin».

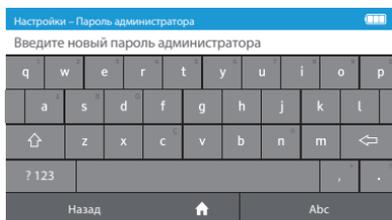


## Установка даты

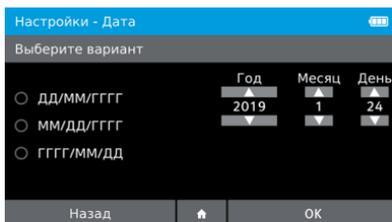

## Установка времени

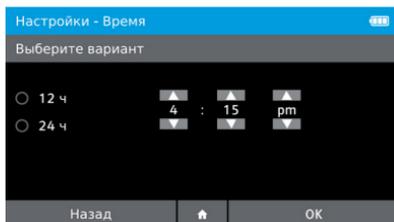

## Проверка калибровки прибора

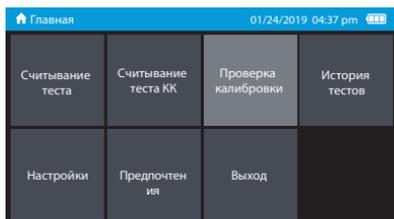

## Сведения для заказов и контактная информация

**REF** LFR-000: считывающее устройство DIGIVAL - OUS ☎ +1 321 441 7200

**REF** LFR-024: считывающее устройство DIGIVAL - US ☎ +1 877 441 7440

## Служба технической поддержки

### США

+1 888 735 5317

ts.scr@abbott.com

### Африка, Российская Федерация и СНГ

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

### Азиатско-Тихоокеанский регион

+61 7 3363 7711

AP.TechSupport@abbott.com

### Канада

+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

### Европа и Ближний Восток

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

### Страны Латинской Америки

+57 601 482 4033

LA.TechSupport@abbott.com



**Abbott**

 **Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.**  
10 Southgate Road  
Scarborough, Maine 04074 USA  
[www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott)



[www.globalpointofcare.eifu.abbott](http://www.globalpointofcare.eifu.abbott)



© 2024 Abbott. All rights reserved.

All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

INLFR009ru Rev. 7 2024/03

**Abbott**  
DIGIVAL

QSG, RU

**Size:**  
5.25 in x 8.5 in

**Printed Colors**



CMYK

**Incoming Inspection Colors  
(For Reference Only)**  
Colors below are not used for printing



PMS 2995 U  
Primary Blue

PMS 303 U  
Dark Blue

**PN:** INLFR009ru  
**Rev:** 7

**Date of Last Revision:**  
7.3 2024/03/18