

INFLUENZA A & B 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σάρωση για να παρακολουθήσετε
το βίντεο "Πώς χρησιμοποιείται το
ID NOW".



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html


Πριν εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή, ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος ID NOW Influenza A & B 2 και στο εγχειρίδιο χρήστη για πλήρη διαδικασία εξέτασης και πρόσθετες πληροφορίες. **Σημείωση:** Για να εκτελέσετε μια εξέταση ποιότητας, ανατρέξτε στην ενότητα **QC Testing [Εξέταση ελέγχου ποιότητας]** στο πίσω μέρος.

Για να εκτελέσετε μια εξέταση ασθενούς, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Φορέστε ένα καθαρό ζευγάρι γάντια.




- 2 Για την εκτέλεση μιας εξέτασης

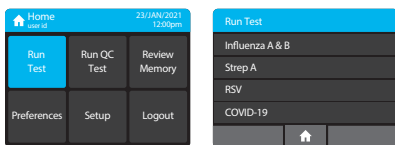

- Πατήστε **Run Test** [Εκτέλεση εξέτασης]
- Επιλέξτε **Influenza A & B** [Γρίπη A και B]
- Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες **ON SCREEN** [Οδηγίες στην οθόνη]

- 3 Εισαγάγετε τη βάση εξέτασης

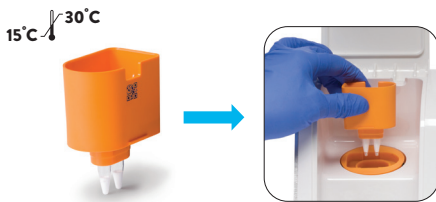


- 4 Εισαγάγετε τον Δέκτη δείγματος



ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ την αλουμινένια σφράγιση μέχρι να σας δοθεί η σχετική οδηγία μετά από 3 λεπτά προθέρμανσης.

- 5

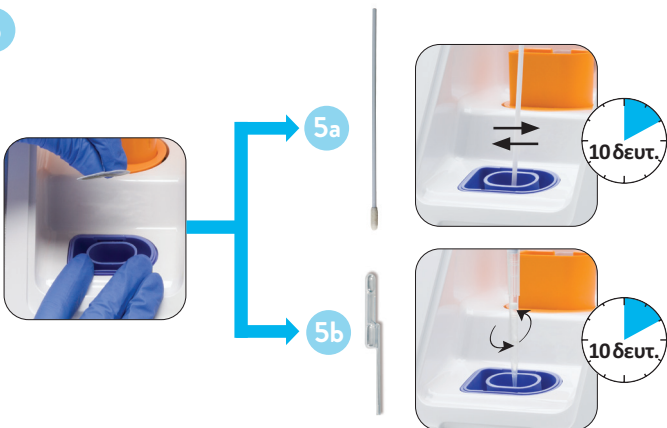


- 6 Πατήστε τη λευκή κασέτα μεταφοράς στον μπλε δέκτη δείγματος



1. Πατήστε **ΣΤΑΘΕΡΑ** τη λευκή κασέτα μεταφοράς στον μπλε δέκτη δείγματος.
2. Περιμένετε έως ότου ακούσετε **τον χαρακτηριστικό ήχο/τους χαρακτηριστικούς ήχους ΚΛΙΚ**.
3. Επιβεβαιώστε ότι η πορτοκαλί ένδειξη έχει ανέβει **ΠΛΗΡΩΣ** στην κορυφή της κασέτας.

- 7 Σηκώστε και πατήστε την κασέτα μεταφοράς στη βάση εξέτασης

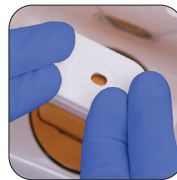

1. Πιέστε προς τα κάτω **ΣΤΑΘΕΡΑ** και με τα **ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ**.
2. Περιμένετε έως ότου ακούσετε **ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΛΙΚ**.
3. Επιβεβαιώστε ότι η πορτοκαλί ένδειξη βρίσκεται **ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΤΩ** προτού συνεχίσετε.

- 8 **ΕΛΕΓΧΟΣ:** Βεβαιωθείτε ότι η πορτοκαλί ένδειξη βρίσκεται εντελώς κάτω



Εάν δεν βρίσκεται εντελώς κάτω, **πιέστε ξανά προς τα κάτω**.







Σημείωση: Αν δεν πιεστεί πλήρως προς τα κάτω ενδέχεται να προκληθεί **ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ** ή **ΨΕΥΔΕΣ** αποτέλεσμα εξέτασης.

- 9 Κλείστε το καπάκι για να ξεκινήσει η εξέταση



- 10 Ανάγνωση αποτελεσμάτων

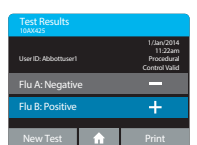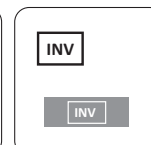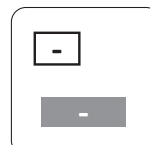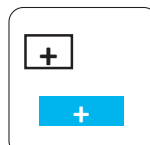

Ανατρέξτε στις οδηγίες του Ένθετου προϊόντος για τη διαδικασία επανελέγχου σε περίπτωση που το αποτέλεσμα εξέτασης είναι διπλά θετικό για τη γρίπη A και τη γρίπη B ή μη έγκυρο.

- 11 Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα στοιχεία εξέτασης



Ανατρέξτε στο Ένθετο προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη δειγμάτων και εξαρτημάτων εξέτασης.

<div>Abbott</div> <div>ID NOW</div> <div>Influenza A & B 2</div> <div></div> <div>QRI, EL</div> <div></div> <div>Size:</div> <div>8.5 in x 14 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN427001el</div> <div>Rev: 7</div> <div></div> <div></div> <div>Date of Last Revision:</div> <div>7.2 2024/01/18</div>
	<div>Incoming Inspection Colors</div> <div>(For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PMS 2995 U</div><div>Primary Blue</div><div>PMS 303 U</div><div>Dark Blue</div><div>PMS 297 U</div><div>Light Blue</div><div>PMS 185 U</div><div>Red</div></div></div>	