

Antes de comenzar


- Lea las instrucciones de uso en su totalidad, antes de usar.
- Cubra su espacio de trabajo con una cubierta absorbente, limpia y desechable.
- Todos los componentes deben ser llevados a temperatura ambiente (entre 15-30 °C) antes de la prueba.

Preparación


- Paquete de prueba (dispositivo de prueba)
- Temporizador (no incluido)
- Guantes desechables (no incluidos)
- Micropipeta y punta desechable (no incluidas)

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las Instrucciones de uso.

1 Verifique la fecha de vencimiento. Si el dispositivo está vencido, utilice otro kit.

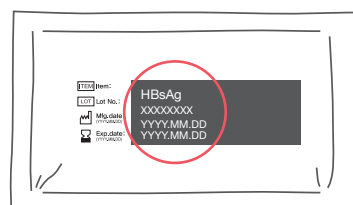


2 Póngase guantes desechables. Use guantes nuevos para cada paciente.

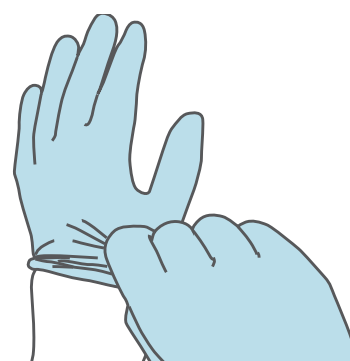


3 Abra el paquete de prueba y revise el desecante. Si el color es verde, utilice otro kit. Escriba el nombre del paciente en el dispositivo de prueba.



Utilice el dispositivo

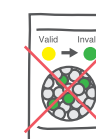


Deseche el dispositivo

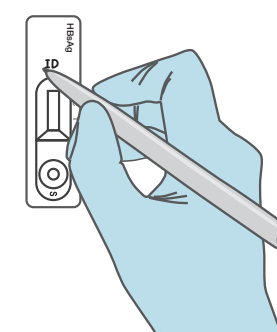


4 Utilice la micropipeta para recolectar suero o plasma (100µl).



5 Agregue la muestra extraída en el pocillo redondo de la muestra (marcado con una 'S'). Deseche la punta usada en la caja de materiales de riesgo biológico después de su uso.

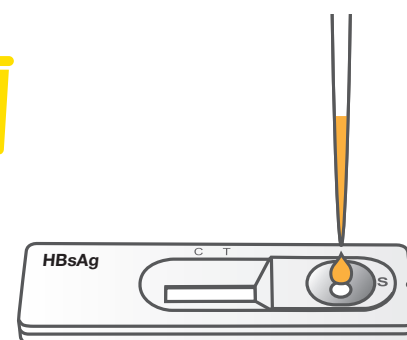

6 Interprete los resultados de la prueba en **20 minutos**. No lea después de 20 minutos. La lectura fuera de este período de tiempo puede dar resultados falsos.

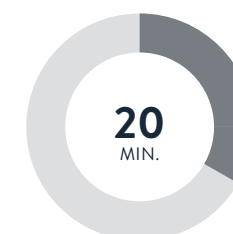

LÍNEA	POSITIVO	NEGATIVO	INVÁLIDO
Control			
Prueba			

Precaución: Las líneas de prueba visibles deben considerarse positivas, incluso si son tenues.

La línea de control debe aparecer para todos los resultados. Si no aparece, el resultado se considera inválido y la muestra debe volver a probarse utilizando un nuevo kit de prueba.

PARA RECIBIR SOPORTE TÉCNICO, VISITE ABBOTT.COM/POCT

© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas mencionadas son marcas comerciales del grupo de empresas Abbott o de sus respectivos propietarios. 120003291-03, 05/19