

Menettelykortti

Käyttöön DIGIVAL™ -lukijan kanssa. Lue koko testimenettely ennen testin suoritusta. Lue tarkat ohjeet BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2 -pakkausselosteesta ja DIGIVAL -lukijan käyttöoppaasta. Valmistajan ohjeita on noudatettava. Jos niitä ei noudateta tai testijärjestelmän ohjeisiin tehdään muutoksia, testi ei enää noudata CLIA Waived -luokitukseen vaadittavia kriteerejä. Tee Osa 1 loppuun ennen testikortin asettamista DIGIVAL -lukijaan.

CLIA-kompleksisuus: WAIVED (vapautettu)


Testin käyttö edellyttää Certificate of Waiver -vapautustodistusta.

Osa 1 – DIGIVAL™ -lukijan käyttöönotto

- 1 AKTIVOI DIGIVAL™ -LUKIJAA**
Paina laitteen etuosassa olevaa virtäpainiketta .




- 2 ANNA KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA**
Paina "OK" tietojen antamisen jälkeen.

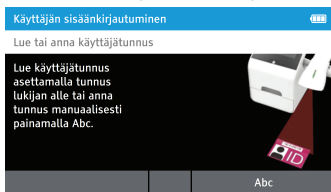


- 3 VALITSE LUE TESTI**
Tämä aloittaa lukuprosessin.




- 4 ANNA TESTILAITTEEN TUNNUS**
Lue testilaitteen tunnus asettamalla testilaitteen foliopussin viivakoodi lukijan alle tai anna tunnus manuaalisesti.

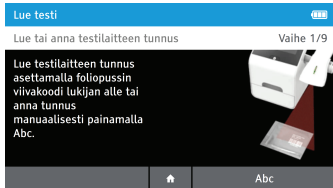

- 5 ANNA POTILASTUNNUS**
Lue potilastunnuksen viivakoodi lukijan alle tai anna tunnus manuaalisesti.

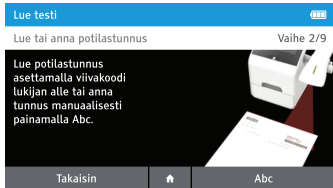

- 6 VAHVISTA ANNETUT TIEDOT**
Varmista, että näytöllä olevat tiedot ovat oikein, ja napauta "OK".

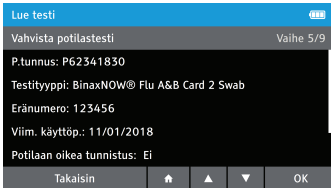

Osa 2 – Testimenettely

Potilas- ja kontrollinäytetikan valmistelu BinaxNOW™-eluointiliuoksella

- 1** Kierrä pullon korkki irti.
- 2** x3 Aseta testattava näytetikka testipulloon. Kierrä tikkua kolme (3) kertaa samalla, kun painat sitä voimakkaasti pullon pohjaa vasten. Minimoi kuplat.
- 3** Paina näytetikkua pullon kylkeä vasten ja käännä tikkua, kun poistat sen pullosta. Tämä poistaa näytteen tikusta. Hävitä tikku biovaarallisen jätteen säiliöön.
- 4** Ota kortti pussistaan **juuri ennen testausta** ja aseta tasaiselle työpöydälle.

- 5** **Purista tästä**
Siirrä näyte pakkaukseen sisältyvällä pipetillä:
Purista yläosan pallo-osaa ja aseta sitten pipetin kärki näytteeseen. Vapauta puristus hitaasti kärjen ollessa näytteessä. Pipettiin imeytyy näin nestettä. Varmista, ettei pipetin alaosassa ole ilmakuplia.
Huomautus: On käytettävä testisarjaan sisältyvää kiinteätilavuuksista pipettiä.
- 6** **Purista tästä**
Testilaitteessa on nuoli, joka osoittaa **VALKOISEEN** näytetyynyyn testiliuskan yläpäässä. Lisää pipetin koko sisältö jatkuvana virtana tämän tyynyn **YLÄPUOLISKOON** niin, että koko näytetilavuus imeytyy tyynyyn. **ÄLÄ** lisää näytettä vaaleanpunaiseen tyynyyn.
- 7** Vedä liimapaperi irti testikortista. Sulje kortti tiiviisti.



SIIRRY VAIHEESEEN 3.

Osa 3 – Tulosten lukeminen



DIGIVAL -lukijaa voidaan käyttää kahdessa eri tilassa (ohitustila tai suoralukutila). Lue täydet käyttöohjeet DIGIVAL -lukijan käyttöoppaasta.

Huomautus: Testin tulokset on luettava tasan 15 minuutin kuluttua, jotta tuloksissa ei olisi virheitä.


- 1a SUORALUKUTILA:**
Avaa vetolaatikko 15 minuutin kuluttua, laita testikortti sisään ja sulje laatikko. ÄLÄ AVAA VETOLAATIKKOA, ennen kuin testin tulos on ilmestynyt näytölle.
- TAI
- 1b OHITUSTILA:**
Kun kortti on suljettu turvallisesti, avaa DIGIVAL-vetolaatikko välittömästi, aseta testilaitte paikalleen ja sulje laatikko. DIGIVAL mittaa testausajan ja lukee tuloksen automaattisesti lukuajan kohtana.

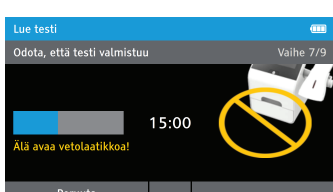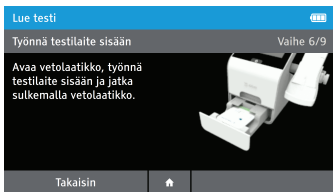

- 2 LUE TESTITULOKSET**
Kun testi on suoritettu, tulokset näkyvät laitteen näytöllä. Jos käytät tulostinta, napauta **Tulosta** testitulosten tulostamiseksi.

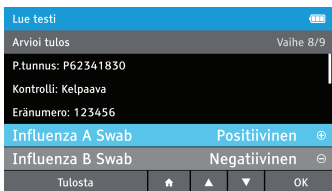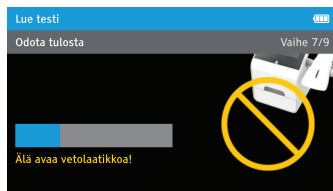






Kaikki epäkelvon tuloksen tuottaneet testit, mukaan lukien A- ja B-influenssapositiiviset testit, täytyy toistaa uudella näytteellä ja uusilla testireagensseilla.

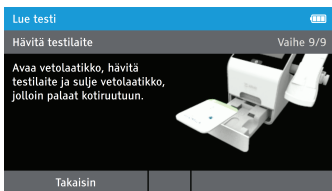

TESTILAITETTA EI SAA TYÖNTÄÄ TAKAISIN, KUN TULOS ON ILMOITETTU.

Menettelykortti

Tulokset näkyvät automaattisesti DIGIVAL -lukijan näytöllä. Tulokset tulkitaan joko positiiviseksi tai negatiiviseksi A- ja B-influenssan osalta, minkä lisäksi näytetään menettelyn kontrolliviivan tila.

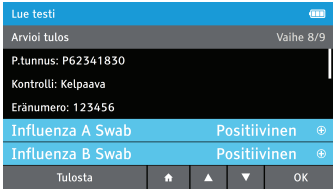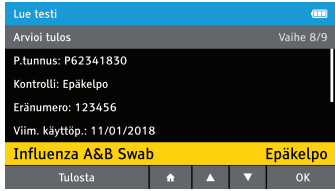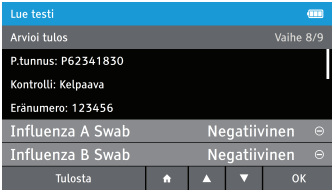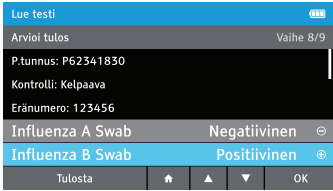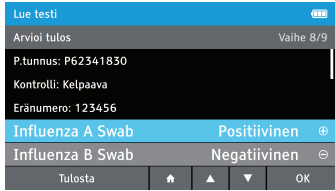

Kaikki epäkelvon tuloksen tuottaneet testit, mukaan lukien A- ja B-influenssaposiitiiviset testit, täytyy toistaa uudella näytteellä ja uusilla testireagensseilla.

Laadunvalvonnan (QC) testaus

BinaxNOW Influenza A & B Card 2:n positiiviset ja negatiiviset kontrollitikut on testattava aina uuden lähetyksen vastaanoton yhteydessä ja kerran jokaisen kouluttamattoman käyttäjän kanssa. Laadunvalvontatesti tehdään samalla tavalla kuin potilasnäytteen testaus. Katso osia 2 ja 3. Valitse kotiruudusta Lue laadunvalvontatesti. Lisätietoja on laadunvalvontatestin tekemistä käsittelevässä DIGIVAL -lukijan käyttöoppaan luvussa.


ALOITAT NAPAUTA LUE LAADUNVALVONTATESTI



1 LUE TAI ANNA TESTILAITTEEN TUNNUS




2 VALITSE SUORITETTAVA LAADUNVALVONTATESTI

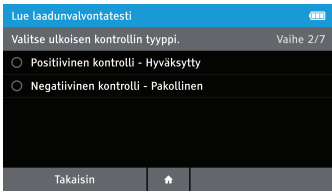


3 VAHVISTA TESTI

Varmista, että näytöllä olevat tiedot ovat oikein, ja napauta "OK".

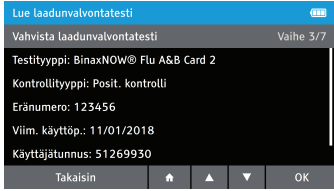

4a SUORALUKUTILA:


Avaa 15 minuutin kuluttua DIGIVAL -vetolaatikko, aseta testi laatikkoon ja sulje laatikko.

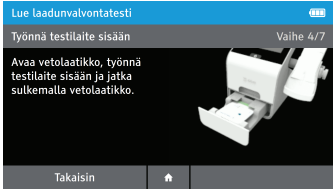

TAI

4b OHITUSTILA:

Kun kortti on suljettu pitävästi, avaa DIGIVAL -vetolaatikko, aseta testi laatikkoon ja sulje laatikko. DIGIVAL mittaa testausajan ja lukee tuloksen automaattisesti lukuajankohtana.

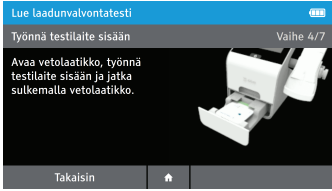


5 LUE LAADUNVALVONTATESTI

ÄLÄ AVAA VETOLAATIKKOA, ennen kuin testin tulos on ilmestynyt näytölle.



6 LUE LAADUNVALVONTATESTIN TULOS

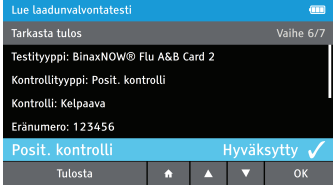

7 HÄVITÄ TESTILAITTE



TESTILAITETTA EI SAA TYÖNTÄÄ TAKAISIN, KUN TULOS ON ILMOITETTU.

Näytteen ottaminen ja käsittely

Käytä tuoreita, juuri otettuja näytteitä, jotta testi olisi mahdollisimman tehokas. Riittämätön näytteenotto tai näytteiden vääränlainen käsittely/kuljetus voi tuottaa väärän negatiivisen tuloksen.

Nenänielutikkunäyte

Vie tikkua suoraan taaksepäin kääntämättä sen kärkeä ylös- tai alaspäin. Nenäkäytävä on sieraimen pohjan eikä nenänselän suuntainen. Kierrä tikkua varovasti ja työnnä se sieraimen etuosaan suulaan suuntaisesti. Vie tikku nenänieluun, jätä tikku paikalleen muutamaksi sekunniksi ja kierrä sitä sitten hitaasti samalla, kun vedät sen takaisin.

Jotta näyte saadaan otettua oikein, tikun pitää kulkea sisään, josta vastaa nenän ja korvan kärjen välisen etäisyyden puoliväliä. Tämä tarkoittaa noin puolta tikun pituudesta. **ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA** työnteessäsi tikkua sisään. Tikun pitäisi kulkea sujuvasti ja vastuksen pitäisi olla mahdollisimman pientä. Jos vastusta tuntuu, tikkua on vedettävä hieman taaksepäin vetämättä sitä ulos sieraimesta. Nosta tämän jälkeen tikun takaosaa ylöspäin ja työnnä tikkua eteenpäin nenänieluun.

Nenätikkunäyte

Käännä tikkua varovasti ja työnnä se niin pitkälle, että tunnet vastusta nenäkuorikon korkeudella (alle 2,5 cm:n syvyydellä sieraimessa). Kierrä tikkua useaan kertaan nenän seinämää vasten ja poista tikku sitten hitaasti sieraimesta.

Teknisen tuen neuvontapuhelin

Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen:

Yhdysvallat

+1 888 735 5317 ts.scr@abbott.com

Afrikka, Venäjä, IVY-maat

+44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com

Aasia (Tyynenmeren alue)

+61 7 3363 7711 APproductsupport@abbott.com

Kanada

+1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com

Eurooppa ja Lähi-itä

+44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com

Latinalainen Amerikka

+57 2 6618797 LAproductsupport@abbott.com

<div>Abbott</div> <div>BinaxNOW</div> <div>Influenza A & B 2</div> <div>DIGIVAL</div> <div>PC - FI</div> <div>Size:</div> <div>8 in x 16.5 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN575001f</div> <div>Rev: 3</div> <div>Date of Last Revision:</div> <div>3.3 2019/12/11</div>
	<div>Incoming Inspection Colors</div> <div>(For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PMS 2995 U</div><div>Primary Blue</div><div>PMS 303 U</div><div>Dark Blue</div><div>PMS 297 U</div><div>Light Blue</div></div></div>	