

Prosedyrekort

For bruk med DIGIVAL™. Les hele testprosedyren før du utfører testen. Se pakningsvedlegget for BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2 og brukerhåndboken for DIGIVAL for fullstendige instruksjoner. Produsentens instruksjoner må følges. Hvis ikke instruksjonene eller modifikasjonene for testsystemet følges, kan det resultere i at testen ikke lenger oppfyller kravene for fritaksklassifisering. Fullfør del 1 før du setter testkortet inn i DIGIVAL.

CLIA-kompleksitet: FRITATT

Et fritakssertifikat kreves for å bruke denne testen.

Del 1 - DIGIVAL™ Oppsett av avleseren

1

AKTIVERE DIGIVAL™

Trykk på strømknappen  på forsiden av instrumentet.



2

ANGI OPERATØR-ID OG PASSORD

Trykk 'OK' etter angivelsen.



3

TRYKK PÅ LES AV TEST

Dette vil starte avlesningsprosessen.



4

ANGI TESTENHET-ID

Skann **Testenhet-ID-en** ved å plassere **folieposens strekkode** under skanneren eller angi manuelt.



5

ANGI PASIENT-ID

Skann **Pasient-ID** ved å plassere **pasient-ID-strekkoden** eller angi manuelt.



6

BEKREFT DATAANGIVELSE

Bekreft at data på skjermen er korrekt og trykk på 'OK'.



Del 2 - Testprosedyre

Prøvepreparering av pasient- og kontrollpensel ved hjelp av BinaxNOW™ Elueringsløsning

1



Vri av hetten på hetteglasset.

2



x 3
Sett penselen som skal testes i hetteglasset. Roter penselen tre (3) ganger mens du presser kraftig mot bunnen av hetteglasset. Minimere bobler.

3



Trykk penselen mot siden av hetteglasset og vri mens du fjerner den fra hetteglasset. Dette fjerner prøven fra penselen. Kast penselen i en avfallsbeholder for mikrobiologisk farlig materiale.

Test væskeprøven (fra testhetteglasset) i BinaxNOW Influenza A & B Card 2 så snart som mulig.

4



Ta kortet ut av posen **rett for testing** og legg det flatt ned på arbeidsbenken.

5



Klem her

Overfør prøven med den medfølgende pipetten. Klem toppdelen og plasser deretter pipettespissen inn i prøven. Slipp sakte ut toppdelen mens spissen fremdeles er i prøven. Dette vil trekke væsken inn i pipetten. Pass på at det ikke er noen luftrom i den nedre delen av pipetten.

Merk: Pipetten med fast volum fra testsettet brukes.

6



Klem her

Se pil på testenhet for å finne det **HVITE** prøvefeltet øverst på teststrimmelen. Tilsett hele innholdet i pipettene i en kontinuerlig strøm på **ØVRE HALVDEL** av dette feltet, slik at hele prøvolumet absorberes inn i dette feltet. **IKKE** påfør prøve på det rosa feltet.

7



Fjern det selvklebende beskyttelsespapiret fra testkortet. Lukk og forsegl kortet godt.

GÅ til DEL 3.

Del 3 - Lese av resultatene

DIGIVAL kan settes til to forskjellige modi (Gå unna eller Les nå). For fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker DIGIVAL

Merk: Testresultatene skal ikke avleses før eller etter 15 minutter, da de kan være unøyaktige.

1a

LES NÅ:

Etter 15 minutter, åpne skuffen, sett inn testkortet og lukk skuffen. **IKKE ÅPNE SKUFFEN** før testresultatene vises på skjermen.





1b

GÅ UNNA-MODUS:

Når kortet er trygt lukket, åpne DIGIVAL-skuffen umiddelbart, før inn testenheten og lukk skuffen. DIGIVAL vil automatisk ta tiden på testutviklingen og lese av resultatet ved avlesningstiden.



2

LES AV TESTRESULTATER

Idet testen er fullført, vises resultatene på skjermen. Hvis du bruker en skriver, slå lett på 'Skriv ut' for å lage en utskrift av testresultatene.





3

KASSER TESTKORT

Åpne skuffen, fjern testkortet og lukk skuffen. Startskjermen vil vises automatisk.














VED OPPNÅDD RESULTAT SKAL TESTENHETEN IKKE SETTES INN PÅ NYTT.

Prosedyrekort

Resultatene vil bli vist på DIGIVAL sin skjerm automatisk. Resultatene vil bli tolket som positive eller negative for influensa A og influensa B, i tillegg til linjestatusen på prosedyrekontrollen.

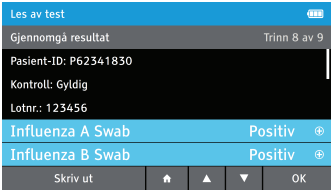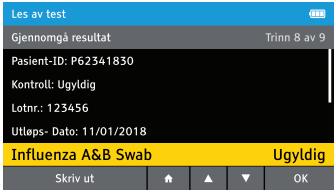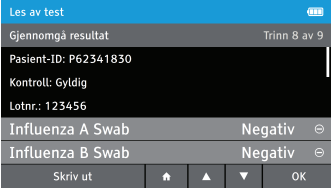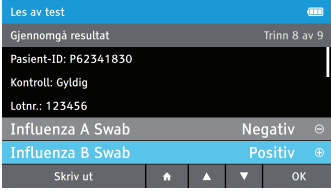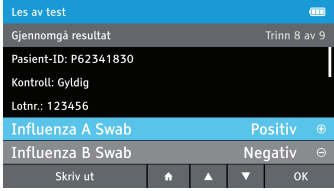


Alle tester med ugyldige resultater, inkludert de som er positive for influensa A og influensa B, må repeteres med en ny prøve og nye testreagenser.


Kvalitetskontroll (QC) – testing

BinaxNOW Influenza A & B Card 2 positive og negative kontrollpensler bør testes for hver nye leveranse og en gang for hver operatør uten opplæring. Kvalitetskontrolltesten kjøres på samme måte som en pasientprøve. Se del 2 og 3. Velg Les av QC-test på startskjermen. Se Kjøre en QC-test i brukerhåndboken for DIGIVAL for mer informasjon.

START SLÅ LETT PÅ LES AV QC-TEST

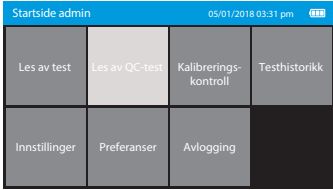


1 SKANN ELLER ANGI TESTENHET-ID

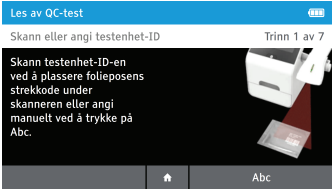


2 VELG QC-TESTEN SOM SKAL KJØRES

Slå lett på ‘OK’ for å fortsette.

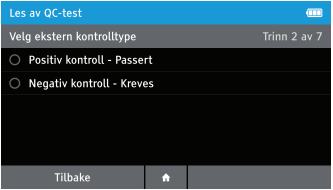


3 BEKREFT TEST

Bekreft at data på skjermen er korrekt og trykk på ‘OK’.

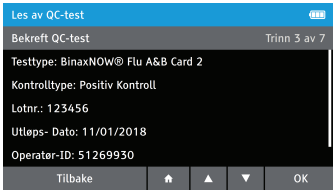

4a LES NÅ-MODUS:


Etter 15 minutters avlesingstid, kan du åpne DIGIVAL-skuffen, sette testen inn i skuffen og lukke skuffen.

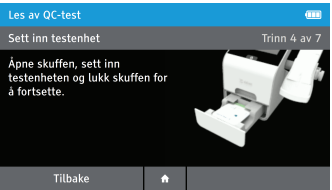

ELLER

4b GÅ UNNA-MODUS:

Når kortet er trygt lukket, åpne DIGIVAL-skuffen umiddelbart, før inn testenheten og lukk skuffen. DIGIVAL vil automatisk ta tiden på testutviklingen og lese av resultatet ved avlesningstiden.

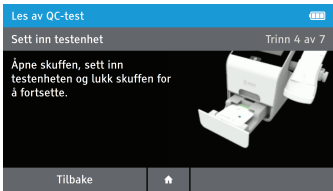


5 LES AV QC-TEST

IKKE ÅPNE SKUFFEN for testresultatene vises på skjermen.



6 LES AV QC-TESTRESULTAT

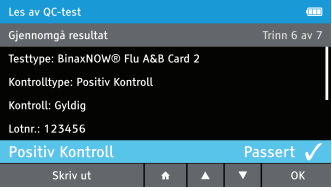

7 KASSER TESTENHET



ETTER AT RESULTATET ER RAPPORTERT SKAL TESTENHETEN IKKE SETTES INN PÅ NYTT.

Prøvetaking og behandling

Bruk nylig innsamlede prøver for å oppnå optimalt testresultat. Utilstrekkelig prøve eller feilaktig håndtering/transport av prøver kan gi et falskt negativt resultat.

Nasofaryngeal pensel

Før penselen direkte innover uten å bøye penselhodet opp eller ned. Neseboret går parallelt med gulvet, ikke med neseryggen. Roter forsiktig mens du skyver penselen bakover inn i neseboret, parallelt med ganen. Før penselen inn i nesesvelget, og la den stå noen sekunder. Deretter roteres penselen langsomt når den trekkes ut. For å sikre korrekt prøveinnsamling skal penselen føres inn til halvveis mellom nesen og øreflippen. Dette utgjør omtrent halve penselens lengde. IKKE BRUK MAKT når du fører inn penselen. Penselen skal lett kunne føres inn, med minimal motstand. Hvis du kjenner motstand, må du trekke ut penselen litt, uten å trekke den ut av neseboret. Hev bakenden av penselen før den føres inn i nesesvelget igjen.





Nesepensel

Roter forsiktig mens du skyver penselen inn til du møter motstand ved nesemuslingene (mindre enn én tomme inn i neseboret). Roter penselen flere ganger mot neseveggen, og trekk den forsiktig ut.

Teknisk støttelinje

Du kan få ytterligere informasjon fra din distributør eller ved å kontakte teknisk støtte på:

USA	
+ 1 888 735 5317	ts.scr@abbott.com
Afrika, Russland og SUS	
+ 44 161 483 9032	EMEdproductsupport@abbott.com
Asia og Stillehavsområdet	
+ 61 7 3363 7711	APproductsupport@abbott.com
Canada	
+ 1 800 818 8335	CANproductsupport@abbott.com
Europa og Midtøsten	
+ 44 161 483 9032	EMEdproductsupport@abbott.com
Latin-Amerika	
+ 57 2 6618797	LAPproductsupport@abbott.com

<div>Abbott BinaxNOW Influenza A & B 2 DIGIVAL</div> <div>PC - NO</div> <div>Size: 8 in x 16.5 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN575001no Rev: 3</div> <div>Date of Last Revision: 3.2 2019/11/21</div>
	<div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div></div><div><div>PMS 303 U Dark Blue</div></div><div><div>PMS 297 U Light Blue</div></div></div>	