

DETERMINE™ HIV-1/2


HURTIGVEILEDNING

Før du begynner:

- Les hele pakningsvedlegget før bruk.
- Finn frem nødvendig utstyr.
- Legg et rent, absorberende underlag til engangsbruk på arbeidsområdet.
- Ta på deg engangshansker.
- Alle komponenter må ha romtemperatur (15–30 °C) før testen utføres.


Fullstendige anvisninger er beskrevet i pakningsvedlegget.

PRODUKT-INFORMASJON

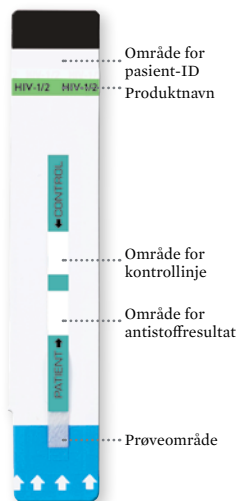


1 KLARGJØR TESTEN

Riv av én testremse fra høyre side, og fjern dekkpapiret.

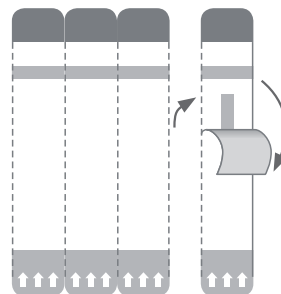

2 PLASSER TESTEN


Legg én testremse på en flat overflate der testen skal utføres.

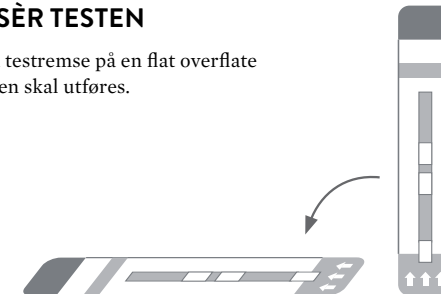

3 TILSETT PRØVEN


Fullblodsprøve fra finger

Tilsett 50 µl fullblod til testputen. Når alt blodet er absorbert i testputen, skal én dråpe Chase Buffer tilsettes testputen umiddelbart.

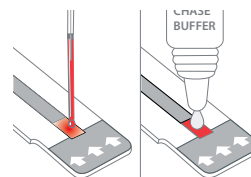


Fullblod fra venepunksjon

Tilsett 50 µl fullblod (med presisjonspipette) til testputen. Vent i 1 minutt, og tilsett én dråpe Chase Buffer.

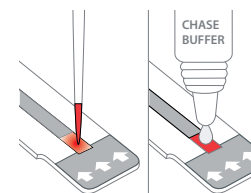

Serum/plasma

Tilsett 50 µl serum eller plasma (presisjonspipette) til testputen.

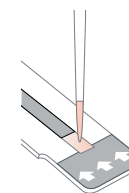

Forsiktig: Ikke løft kapillærrøret fra testputen før hele blodet er overført.

4 LES AV RESULTATENE

Vent i minst 15 minutter (maksimum 60 minutter) før du leser av resultatet.

Ikke avles testresultater etter mer enn 60 minutter.

Kontrolllinjen skal komme til syne ved alle resultater. Hvis den ikke vises, er resultatet ugyldig, og testen må gjentas.



LINJE	POSITIVT	NEGATIVT	UGYLDIG
Kontroll			
Pasient			

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON VENNLIGST BESØK ABBOTT.COM/POCT

© 2019 Abbott. Med enerett. Alle varemerker det er henvist til, er varemerker som tilhører Abbott-konsernet eller dets respektive eiere.
120001058-03 12/19

