



Förberedelser inför analys

AFINION™ ACR Testkassett

- Testkitet kan förvaras i kylskåp (2–8 °C) fram till utgångsdatumet.
- Testkassetten måste uppnå en temperatur på 20–30 °C före användning. Låt den öppnade foliepåsen ligga på bänken i minst 15 minuter.
- Använd testkassetten inom 10 minuter efter att foliepåsen har öppnats.
- Håll testkassetten i handtaget.

Patientprov

- Urinprovet kan tas när som helst men första morgonurinen är att föredra.
- Proverna kan förvaras i kylskåp (2–8 °C) i 5 dagar. Får inte frysas.
- Blanda provet väl genom att vända ampullen 8–10 gånger före användning.

AFINION™ ACR Control

- Kontroller ska förvaras i kylskåp (2–8 °C). Kontroller i öppnade förpackningar är stabila i 8 veckor.
- Kontrollen kan användas kylskåpskall.
- Blanda kontrollen väl genom att vända flaskan 8–10 gånger före användning.
- Det uppmätta värdet ska ligga inom de godkända gränser som anges i bruksanvisningen till Afinion ACR Control.
- Se bruksanvisningen för information om hur ofta kontroller bör testas.

AFINION™ 2 -instrumentet

- Starta instrumentet och ange eventuellt operatörs-ID.
- Analysera patientprover och kontroller i enlighet med testproceduren på omstående sida.
- En informationskod kan visas under analysen. Möjliga orsaker och åtgärder finns i användarmanualen till **AFINION 2**-instrumentet.



Informationskoder som är specifika för AFINION™ ACR-analysen:


Kod	Orsak
107	Kreatin för högt
108	Blod i urinen har påvisats av instrumentet




Läs användarinstruktionerna till AFINION™ för fullständig information:

- Bruksanvisningen till Afinion ACR.
- Bruksanvisningen till Afinion ACR Control.
- Användarmanualen till **AFINION 2**-instrumentet.


Testprocedur

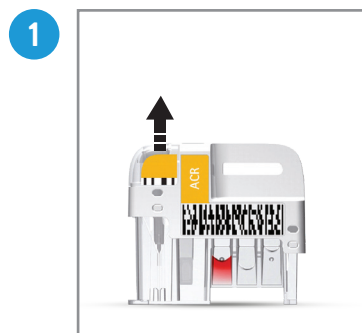

1 Dra provtagningsenheten rakt upp från testkassetten.

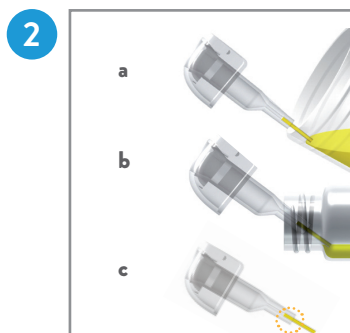

2 Fyll kapillärröret. Vidrör ytan på patientprovet (a) eller kontrollen (b). Fyll kapillärröret helt (c). Torka inte av kapillärröret.

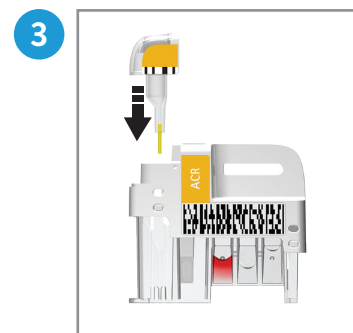

3 Sätt omedelbart tillbaka provtagningsenheten. Analysen av testkassetten måste startas inom 1 minut.



4 Tryck på för patientprover eller på för kontroller. Luckan öppnas automatiskt.



5 Sätt in testkassetten med streckkoden åt vänster.



6 Stäng luckan manuellt för att starta analysen.



7 Tryck på och ange patient-ID, eller tryck på och ange kontroll-ID. Tryck på för att bekräfta.



8 Anteckna resultatet när det visas på skärmen. Tryck på för att godkänna. Luckan öppnas automatiskt.



9 Ta omedelbart bort och kasta den använda testkassetten. Stäng luckan manuellt när instrumentet inte ska användas.