

Abbott ID NOW[™] COVID-19 LYNVEJLEDNING

Nødvendige materialer til kørsel af en test:




Instrument:

Testbaseholder

Prøve-modtager-holder

Låg

Display

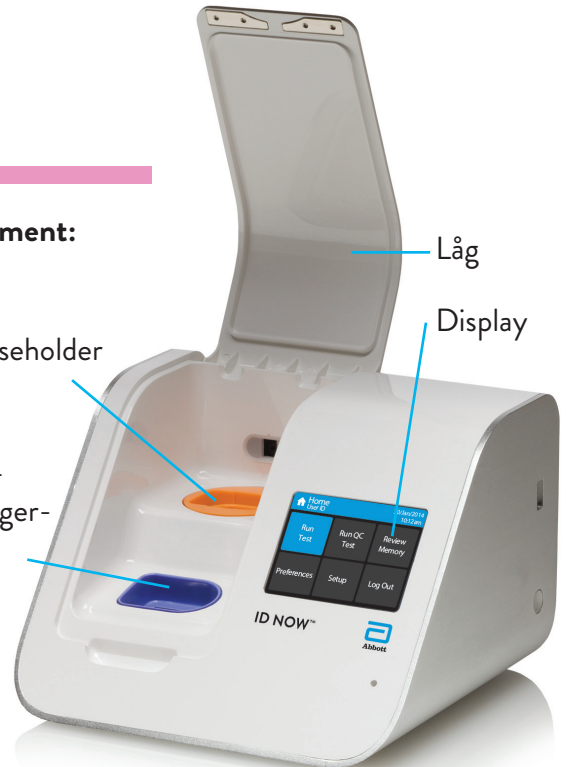

Se hele vejledningen i indlægssedlen og brugervejledningen til ID NOW COVID-19.

PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING

Anvend prøver, der ligger i et optimalt testresultat. Udløst af fejlagtig prøvetagning eller forkert håndtering, opbevaring eller transport af prøver kan medføre fejlagtige resultater.

Næsepodprøve

En næsepodprøve tages ved forsigtigt at føre podepinden ind i det næsebor, der løber mest, eller

det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke ses udløb. Mens podepinden drejes forsigtigt,

skubbes den ind, indtil der mødes modstand på niveau med næsemuslingerne (mindst end 2,5 cm

inde i næsebor). Drej podepinden flere gange mod næseveggene, og tag den derefter langsomt

ud af næsebor. Med den samme podeping gentages prøvetagningen i det andet næsebor.

Puritan Puriflock Standard Tip Ultra flocced podepinde, Puritan Puriflock Mini Tip Ultra flocced

podepinde og Copan Standard Rayon Tip podepinde egner sig ikke til denne test.

Næse/svælg-podprøve

En næse/svælg-podprøve tages ved forsigtigt at føre podepinden ind i det næsebor, der løber mest,

eller det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke ses udløb. Føring af podepinden bagud i en lige

linje uden at vippe podepindshovedet op eller ned. Næsepassagen løber parallelt med gulvet, ikke

parallel med næseveggene. Føring af podepinden fremføres ind i næseveggens rummet. Lad den

sidde i et par sekunder, og drej derefter langsomt podepinden, mens den trækkes tilbage.

For at sikre at prøvetagningen udføres korrekt, skal podepinden føres ind til halvdelen af afstanden

for næsen til ørespidsen. Dette er ca. halvdelen af podepindens længde. **PRES IKKE FOR MEGET**

under indføringen af podepinden. Podepinden skal kunne bevæges med minimal modstand. Hvis der

moder modstand, trækkes podepinden lidt tilbage uden at tage den ud af næsebor. Løft derefter

bagdelen af podepinden, og bevæg den fremad ind i næseveggens rummet.

Halspodprøve

Tag patientprøven ved at føre podepinden ind bagst i svælg til mandlerne og til andre betændte

områder. Undgå at berøre tungen, kinden og tænder med podepinden. Rayonpodepinde egner sig

Reference

Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, Vol. 1, ASM. (2015) s. 279.

Teknisk supports rådgivningsslinje

Yderligere information kan fås fra forhandleren eller ved at kontakte teknisk support på:

USA +1 855 731 2288
Afrika, Rusland, SNG +44 161 483 9032
Asien og Stillehavsområdet +61 7 3363 7711
Canada +1 800 818 8335
Europa og Mellemøsten +44 161 483 9032
Latinamerika +57 (1) 4824033
Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, ME 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott



4

Bekræft testen

Tryk på 'OK' for at bekræfte, at testtypen svarer til den kvalitetskontrolprøve, der skal testes, og gennemfør testen ved at følge instruktionerne på skærmen.

3

Vælg den QC-test, der skal køres.

2

Vælg 'COVID-19' på menuen.

1

Tryk på 'Kør QC-test'.

En ekstern positiv og en negativ sterilt kontrolpodprøve skal testes én gang for hver ny forsendelse, som modtages, og én gang for hver uoplært operatør. Ved QC-tests vælges 'Kør QC-test' på startskærmen. Følg derefter de viste anvisninger. Se flere oplysninger i afsnittet om kørsel af kvalitets-tests i brugervejledningen til ID NOW Instrument.



Bemærk: QC-testen køres på samme måde som en patienttest med direkte næsepodprøve. Se trinvis anvisninger på den modsatte side.
© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.
Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

ID NOW™ COVID-19 LYNVEJLEDNING

Se hele testproceduren og få flere oplysninger i indlægssedlen og brugervejledningen til ID NOW COVID-19, inden testen udføres.

Følg den trinvis vejledning, som vises på instrumentskærmen.

1



2

15°C – 30°C



3

15°C – 30°C






Prøvemodtageren
må først åbnes, efter
at den er anbragt i
instrumentet.


4







5

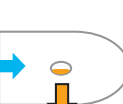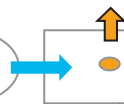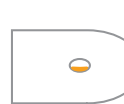

6

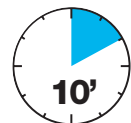

7

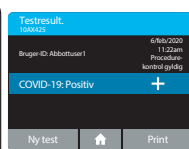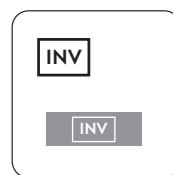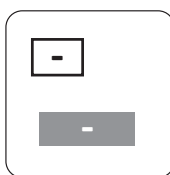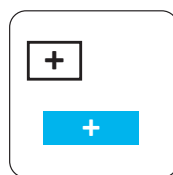



Se anvisningerne i
indlægssedlen, hvis
resultatet er ugyldigt,
og testen skal gentages.

8



Se i indlægssedlen, hvordan prøver og testkomponenter håndteres sikkert og bortskaffes.

<p>Abbott ID NOW COVID-19</p> <p>QRI, DA</p> <p>Size: 8.5 in. x 11 in.</p>	<p>Printed Colors</p>  <p>CMYK</p>	<p>PN: IN191001da Rev: 1</p> <p>Date of Last Revision: 1.1 2020/09/10</p>
	<p>Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing</p>  <p>PMS 2995 U Primary Blue</p> <p>PMS 303 U Dark Blue</p> <p>PMS 224 U Magenta-Pink</p>	