


Nota: La prueba de CC se realiza de la misma forma que la prueba de paciente con hisopo nasal directo. Consulte la otra cara para obtener instrucciones paso a paso.

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

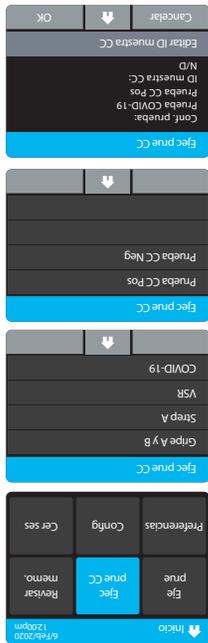


4 Confirmar la prueba
Para confirmar que el tipo de prueba coincide con la muestra de control de calidad que va a analizarse, toque 'OK' y siga las instrucciones en pantalla para completar la prueba.

3 Seleccione la prueba de control de calidad que vaya a procesarse.

2 Seleccione 'COVID-19' del menú.

1 Toque 'EjeC pvue CC'.

Debden probarse un hisopo de control positivo externo y un hisopo estéril de control negativo una vez con cada nuevo envío recibido y una vez por cada operador no capacitado. Para las pruebas de control de calidad, seleccione EjeC pvue CC en la pantalla de inicio y siga las instrucciones que se muestran. Consulte el apartado Realización de una prueba de control de calidad en el Manual del usuario del ID NOW Instrument para obtener más detalles.

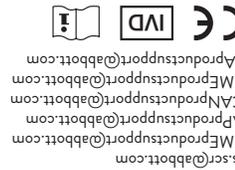

Linea de ayuda del soporte técnico
Puede obtener más información en su distribuidor o en Soporte técnico en:
Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, Vol. 1, ASM, (2015) pg. 279.

Referencias bibliográficas

Hisopo faríngeo
Recoga la muestra del paciente frotando la faringe posterior, las amígdalas y otras áreas inflamadas. Evite tocar la lengua, las mejillas y los dientes con el hisopo. Los hisopos de rayón no son adecuados para su uso.

Hisopos nasofaríngeos
Para recoger una muestra de hisopo nasofaríngeo, inserte cuidadosamente el hisopo en la fosa nasal que muestra el drenaje más visible, o la fosa nasal que está más congestionada si el drenaje no es visible. Pase el hisopo directamente hacia atrás sin inclinar la cabeza del hisopo hacia arriba o hacia abajo. El pasaje nasal discurrir paralelo al suelo, no paralelo al puente de la nariz. Aplicando un suave giro, inserte el hisopo en la fosa nasal anterior, paralela al paladar, y haga avanzar el hisopo hacia la nasofaringe. Déjelo colocado unos segundos y luego gire lentamente el hisopo a medida que se retrae. Para garantizar una recogida adecuada, el hisopo debe hacerse pasar una distancia que sea la mitad desde la nariz hasta la punta de la oreja. Esto es aproximadamente la mitad de la longitud del hisopo. **NO FUERCE** la introducción del hisopo. El hisopo debe introducirse suavemente con una resistencia mínima; si se encuentra resistencia, retire el hisopo un poco sin sacarlo de la fosa nasal. Luego eleve la parte posterior del hisopo y muevalo hacia la nasofaringe.

Hisopo nasal
Para recoger una muestra de hisopo nasal, inserte cuidadosamente el hisopo en la fosa nasal que muestra el drenaje más visible, o la fosa nasal que está más congestionada si el drenaje no es visible. Aplicando una rotación suave, introduzca el hisopo hasta que se encuentre resistencia al nivel de los cometes (menos de 2,5 en el interior de la fosa nasal). Cíbre el hisopo varias veces contra la pared nasal y luego saque lentamente. Con el mismo hisopo, repita la recogida de muestras en la otra fosa nasal. Los hisopos flocados de punta estándar Ultra Puritan Purlock, los hisopos flocados de mini punta Puritan Purlock y los hisopos de punta de rayón estándar Copan no son adecuados para su uso.

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS
Utilice muestras recién recogidas para garantizar un rendimiento óptimo de la prueba. La recogida inadecuada de muestras o la manipulación/almacenamiento/transporte incorrectos de la muestra pueden dar lugar a resultados erróneos.



ID NOW COVID-19 INSTRUCCIONES DE REFERENCIA RÁPIDA

Materiales necesarios para realizar una prueba:



Base de prueba



Receptor de muestras



Cartucho de transferencia



Hisopo de paciente

Instrumento:

Soporte de la base de prueba

Soporte del receptor de prueba



Consulte el prospecto de producto y el manual del usuario del ID NOW COVID-19 para obtener instrucciones completas.

ID NOW™ COVID-19

INSTRUCCIONES DE REFERENCIA RÁPIDA

Antes de realizar esta prueba, consulte el prospecto de producto y el manual del usuario del ID NOW COVID-19 para obtener detalles sobre el procedimiento de prueba e información adicional.


Siga las instrucciones paso a paso que se muestran en la pantalla del instrumento.

1



2

15°C - 30°C

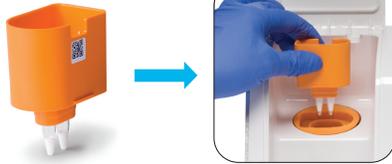

3

15°C - 30°C




No abra el receptor de muestras antes de colocarlo en el instrumento.

4




5

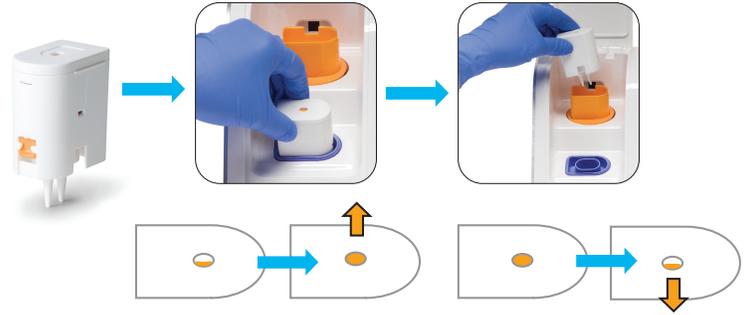

6



7

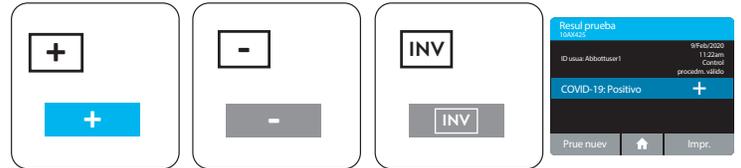

Consulte las instrucciones del prospecto del producto para ver el procedimiento de repetición de prueba en el caso de un resultado no válido.

8



Consulte el prospecto del producto para obtener instrucciones sobre la manipulación y la eliminación seguras de muestras y los componentes de prueba.

<p>Abbott ID NOW COVID-19</p> <p>QRI, ES</p> <p>Size: 8.5 in. x 11 in.</p>	<p>Printed Colors</p>  <p>CMYK</p> <hr/> <p>Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing</p>  <p>PMS 2995 U Primary Blue</p>  <p>PMS 303 U Dark Blue</p>  <p>PMS 224 U Magenta-Pink</p>	<p>PN: IN191001es Rev: 1</p> <p>Date of Last Revision: 1.1 2020/09/10</p>
---	---	--