

**Opmerking:** De QC-test wordt net zo uitgevoerd als een patiënttest van een rechtstreekse nieuwstest. Zie ommezijde voor stop-voor-stop-instructies.

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

Start		6/15/2020 12:00pm	
Test	QC-test	Getuigen	QC-test
Voorkeuren	Inst.	Afmelden	
<div> <div>QC-test uitv.</div> <div>Grasp A en B</div> <div>Strip A</div> <div>RSV</div> <div>COVID-19</div> </div>			
<div> <div>QC-test uitv.</div> <div>Negative QC-test</div> <div>Positive QC-test</div> </div>			
<div> <div>QC-test uitv.</div> <div>QC-monster-id</div> <div>N.v.t.</div> </div>			
<div> <div>QC-monster-id</div> <div>OK</div> </div>			

De wattenstaafjes voor externe positieve en negatieve controle moeten eenmaal worden getest bij elke nieuwe zending die binnenkomt en eenmaal voor elke ongetrainde gebruiker die het instrument bedient. Selecteer om een QC-test uit te voeren 'QC-test uitv.' op het startscherm en volg de weergegeven instructies. Raadpleeg 'QC-test uitvoeren' in de gebruikershandleiding van het ID NOW instrument voor meer informatie.

1 Raak 'QC-test uitv.' aan.

2 Selecteer 'COVID-19' in het menu.

3 Selecteer de QC-test die u wilt uitvoeren.

4 Test bevestigen.

Controleer of het testtype overeenkomt met het type QC-monster dat u wilt testen door 'OK' aan te raken en de aanwijzingen op het scherm te volgen om de test te voltooien.

## MONSTERS VERZAMELEN en HANTEREN

Gebruik vers verzamelde monsters voor optimale testprestaties. Ontoereikende monsterverzameling of een verkeerde hantering/opslag/transport van de monsters kan leiden tot onjuiste resultaten.

### Neusuitstrijke

Als u een neusuitstrijke wilt verzamelen, plaats u het wattenstaafje voorzichtig in het neusgat met de meest zichtbare vochtlaag of het neusgat dat het meest verstopt is als geen vochtlaag zichtbaar is. Duw het wattenstaafje in het neusgat door voorzichtig te draaien tot u weerstand ondervindt ter hoogte van de neuskegel (minder dan 2,5 cm in het neusgat). Beweeg het wattenstaafje al draaiend de monsterafname in het andere neusgat met hetzelfde wattenstaafje. Puritan PurFloek Standard Tip Ultra Flocked-wattenstaafjes, Puritan PurFloek Mini Tip Ultra Flocked-wattenstaafjes en Copan Standard Rayon Tip-wattenstaafjes zijn niet geschikt voor gebruik.

### Nasofaryngeaal uitstrijke

Voor het afnemen van een nasofaryngeaal uitstrijke plaats u het wattenstaafje voorzichtig in het neusgat met de meest zichtbare vochtlaag of het neusgat dat het meest verstopt is als geen vochtlaag zichtbaar is. Voer het wattenstaafje recht naar achteren in zonder de kop van het wattenstaafje omhoog te draaien. Het neuskanaal loopt parallel aan de neusbodem, niet parallel aan de neusbijl. Met een voorzichtig draaiende beweging plaats u het wattenstaafje in de naris anterior parallel aan het neusgat en draait u het wattenstaafje langzaam terwijl u het terugtrekt. Voor een correcte afname moet het wattenstaafje een afstand doorlopen tot halverwege tussen de neus en de oorlel. Dit is ongeveer de helft van de lengte van het wattenstaafje. **GEBRUIK GEEN KRACHT** bij het indringen van het wattenstaafje. Het wattenstaafje moet soepel bewegen met minimale weerstand; als weerstand wordt ondervonden, trekt u het wattenstaafje een beetje terug zonder het uit het neusgat te nemen. Vervolgens tilt u de achterkant van het wattenstaafje op en brengt u het verder in de nasofarynx in. Verzamel een patiëntmonster door over de achterste keelholte, mandelen en andere ontstoken gebieden te vegen. Raak de tong, wang en tanden niet aan met het wattenstaafje. Rayon-wattenstaafjes zijn niet geschikt voor gebruik.

### Literatuur

Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, Vol. 1, ASM. (2015) blz. 279.

## Advieslijn voor technische ondersteuning

N neem voor meer informatie contact op met uw distributeur of met de technische ondersteuning via:

VS  
+1 855 731 2288  
+1 855 731 2288  
EMCproductsupport@abbott.com  
tsc@abbott.com

Afrika, Rusland, GOS  
+44 161 483 9032  
+44 161 483 9032  
EMCproductsupport@abbott.com

Azie en Pacific gebied  
+61 7 3363 7711  
+61 7 3363 7711  
EMCproductsupport@abbott.com

Canada  
+1 800 818 8335  
+1 800 818 8335  
EMCproductsupport@abbott.com

Europa en Midden-Oosten  
+44 161 483 9032  
+44 161 483 9032  
EMCproductsupport@abbott.com

Latijns-Amerika  
+57 (1) 4824033  
+57 (1) 4824033  
EMCproductsupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.  
10 Southgate Road  
Scarborough, Maine 04074 USA  
www.globalpointofcare.abbott



# ID NOW<sup>™</sup> COVID-19 BEKNOPT INSTRUCTIES

## Benodigde materialen voor het uitvoeren van een test:



Testbasis



Monsterontvanger




Overdrachts-cassette



Wattenstaafje voor patiënten

## Instrument:

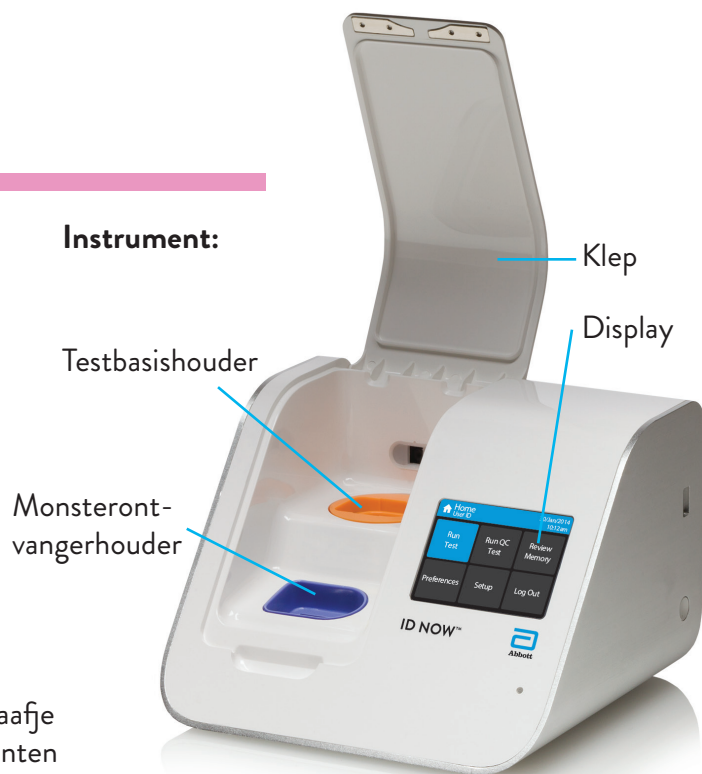

Raadpleeg de bijsluiter en gebruikershandleiding van ID NOW COVID-19 voor volledige instructies.

# ID NOW™ COVID-19 BEKNOPTE INSTRUCTIES

Raadpleeg voordat u deze test uitvoert de bijsluiter en gebruikershandleiding van de ID NOW COVID-19 voor de volledige testprocedure en aanvullende informatie.

Volg de stap-voor-stapinstructies die op het scherm van het instrument worden getoond.

1



2

15°C – 30°C



3

15°C – 30°C






De monsterontvanger niet openen voordat deze in het instrument wordt geplaatst.

4






5

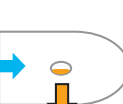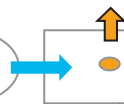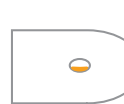

6




7

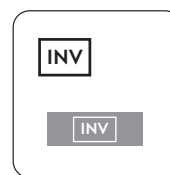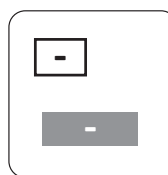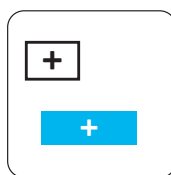



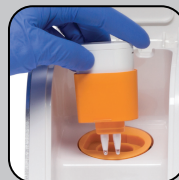

Raadpleeg de instructies in de bijsluiter voor de procedure voor opnieuw testen bij een ongeldig resultaat.

8



Raadpleeg de bijsluiter voor instructies voor veilig hanteren en afvoeren van monsters en testcomponenten.

<b>Abbott</b> ID NOW COVID-19  QRI, NL  <b>Size:</b> 8.5 in. x 11 in.	<b>Printed Colors</b>  CMYK	<b>PN:</b> IN191001nl <b>Rev:</b> 1  <b>Date of Last Revision:</b> 1.1 2020/09/10
	<b>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</b> Colors below are not used for printing  PMS 2995 U Primary Blue  PMS 303 U Dark Blue  PMS 224 U Magenta-Pink	