



Klargøring til analyse

AFINION™ ACR testkassette

- Opbevar testkittet i køleskab (2-8°C) indtil udløbsdatoen.
- Testkassetten skal opnå en temperatur på 20-30°C før brug.
Lad den uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i mindst 15 minutter.
- Testkassetten skal anvendes inden for 10 minutter efter åbning af folieposen.
- Hold testkassetten i håndtaget.

Patientprøve

- Brug tilfældig urin, helst den første morgenurin.
- Prøver kan opbevares i køleskab (2-8°C) i 5 dage. Må ikke fryses.
- Bland prøven ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.

AFINION™ ACR Kontrol

- Opbevar kontrollerne i køleskab (2-8°C). Åbne kontroller er stabile i 8 uger.
- Kontrollen kan bruges direkte fra køleskabet.
- Bland kontrollen ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.
- De målte værdier skal være inden for det acceptable område, der er angivet i indlægssedlen for Afinion™ ACR Kontrol.
- Læs indlægssedlen angående anbefalet hyppighed for kontroltestning.

AFINION™ 2-instrumentet

- Tænd for analyseinstrumentet, og indtast eventuelt operatør-ID.
- Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på bagsiden.
- Der fremvises muligvis en informationskode under analysen.
Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet er angivet i brugermanualen til **AFINION™** 2-instrumentet.



Informationskoder, der er specifikke for AFINION™ ACR-analysen:


Kode	Årsag
107	Kreatin for høj
108	Blod i urinen påvist af Analyzer




Konsulter AFINION™ brugermanualen for komplet information:

- Afinion ACR-indlægsseddel.
- Afinion ACR Kontrol-indlægsseddel.
- Brugermanualen til **AFINION™** 2-instrumentet.


Testprocedure

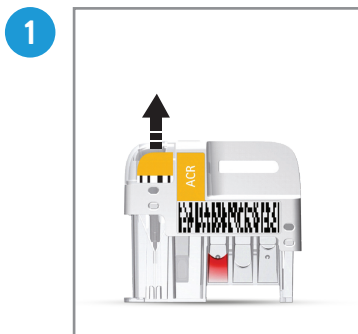

Træk prøvetagningsenheden lige op af testkassetten.

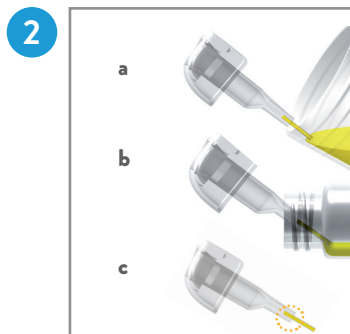

Fyld kapillærrøret; lad enden af kapillærrøret berøre overfladen af patientprøven (a) eller kontrollen (b). Fyld det helt op (c). Tør ikke kapillærrøret af.

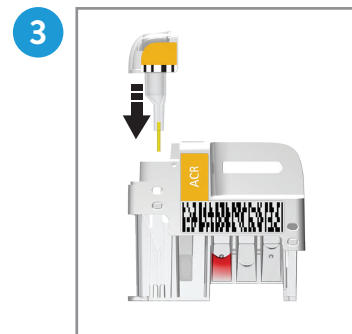

Sæt straks prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten. Analysen af testkassetten skal påbegyndes inden for 1 minut.



Tryk på for patientprøver, eller tryk på for kontroller. Låget åbner automatisk.



Isæt testkassetten med strekkoden mod venstre.



Luk låget manuelt for at starte analysen.



Tryk på , og indtast patient-ID, eller tryk på , og indtast kontrol-ID. Tryk på for at bekræfte.



Gem resultatet, når det kommer frem på displayet. Tryk på for at acceptere. Låget åbner automatisk.



Fjern og bortskaf den brugte testkassette straks efter brug. Luk låget manuelt, når analyseinstrumentet ikke er i brug.